



Aufgrund der gestiegenen Hygieneanforderungen und weitreichenden Maskenpflicht haben wir aus unserem bestehenden Produktportfolio das SynFlex FaceShield entwickelt. Dieses fertigen wir mithilfe unserer Laseranlage am Standort Schramberg.

- leichtes und hochwertiges Gesichtsvisier
- Antibeschlag-Beschichtung
- hoher Tragekomfort
- sichere Befestigung
- sichtbare Mimik
- einfache Montage
- für Brillenträger geeignet
- ermöglicht die zusätzliche Nutzung von Mund-Nasen-Schutz
- einfache Reinigung

## Preise

Pro verkauftem FaceShield geben wir ein Gesichtsvisier **kostenlos** an eine gemeinnützige Einrichtung.

Menge	Stückpreis
ab 10 Stk.	7,90 €
ab 50 Stk.	6,50 €
ab 100 Stk.	5,80 €

Keine Versandkosten.  
Alle Preise Netto zzgl. ges. Umsatzsteuer.  
Inhalt je Verpackungseinheit 10 Stück.

## Montage

Zu unserem Aufbauvideo gelangen Sie über unsere Homepage [www.synflex.de/news/faceshield](http://www.synflex.de/news/faceshield) oder über unseren YouTube Kanal: **SynFlex Group – Resource of Power**.

## Bestellung

Kontaktieren Sie für die Bestellung des FaceShields bitte wie gewohnt Ihren Kundenberater oder setzen sich über [faceshield@synflex.de](mailto:faceshield@synflex.de) mit uns in Verbindung.

Sie sind eine gemeinnützige Einrichtung und haben Interesse? Melden Sie sich bei [faceshield@synflex.de](mailto:faceshield@synflex.de)


## Hinweise

Das Produkt dient im Umgang mit Personen im näheren Umfeld als Schutz vor Spritzern und Tröpfchen. Es ist kein Ersatz zum Mund-Nasen-Schutz. Das Produkt ist nach keiner Norm geprüft und kein Medizinprodukt.

Ein Umtausch geöffneter Verpackungen ist aus hygienischen Gründen nicht möglich.

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmen und Gewerbetreibende.

## Montageanleitung

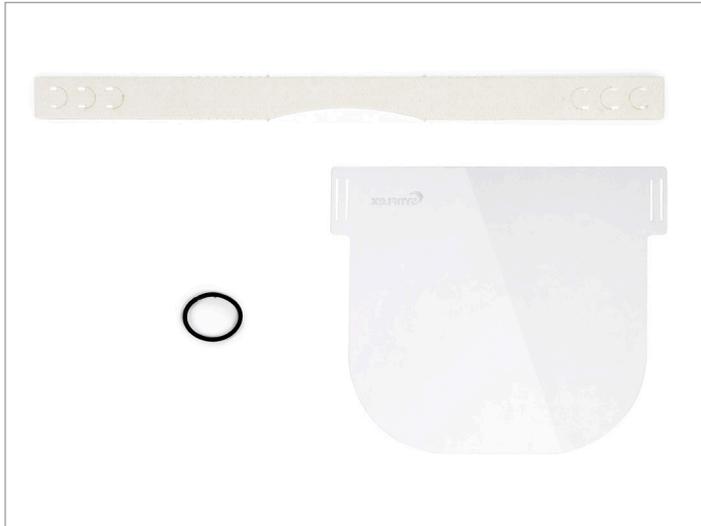

### Schritt 1:

Legen Sie das Visier und das Kopfband wie abgebildet vor sich. Achten Sie darauf, dass beim Visier das SynFlex-Logo oben links ist und beim Kopfband die Vlies-Seite zu Ihnen zeigt. Der mittig verlaufende Bogen zeigt nach unten.



### Schritt 2:

Fädeln Sie seitenweise die Enden des Kopfbandes durch die Schlitzes des Visiers.

Mit den Arretierungspunkten am Kopfband lässt sich der Abstand vom Visier zum Gesicht verstellen und fixieren.



### Schritt 3:

Fädeln Sie das mitgelieferte Gummi durch die Ösen des Kopfbands. Die verschiedenen Ösen erlauben eine mehrstufige Einstellung an den Kopfumfang.

Bei kleinen Kopfumfängen kann das Kopfband mit einer Schere um nicht benötigte Ösen eingekürzt werden.