


Montageanleitung

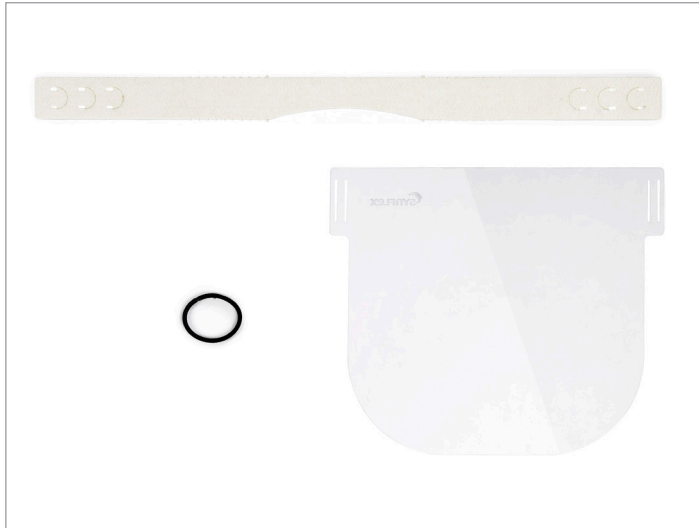

Schritt 1:

Legen Sie das Visier und das Kopfband wie abgebildet vor sich. Achten Sie darauf, dass beim Visier das SynFlex-Logo oben links ist und beim Kopfband die Vlies-Seite zu Ihnen zeigt. Der mittig verlaufende Bogen zeigt nach unten.



Schritt 2:

Fädeln Sie seitenweise die Enden des Kopfbandes durch die Schlitzte des Visiers.

Mit den Arretierungspunkten am Kopfband lässt sich der Abstand vom Visier zum Gesicht verstellen und fixieren.



Schritt 3:

Fädeln Sie das mitgelieferte Gummi durch die Ösen des Kopfbands. Die verschiedenen Ösen erlauben eine mehrstufige Einstellung an den Kopfumfang.

Bei kleinen Kopfumfängen kann das Kopfband mit einer Schere um nicht benötigte Ösen eingekürzt werden.